

PUVA Control

Puva Combi Light UV Therapy

iPad App

Voeg een patiënt toe

Druk hier om te wisselen tussen uvA en uvB

Druk hier om handmatig de dosis in te stellen

Patiëntenlijst

Geselecteerde patiënt

Druk hier om de patiëntgegevens of behandeling te wijzigen

Deze groene indicator geeft aan dat de iPad verbonden is met de cabine

Een oplichtend silhouet geeft de werking van de lampen aan

Patiëntgegevens

Druk een patiënt fiche af

Instellingen

Handbediening

Patiënten

Wijzig

+

Viviane Gucci (Behandeling Actief)

10:13

33%

UV B

0.316 Joule

Timer: 0:07

Intensiteit: 14.770 mW/cm2

Lampen Aan

Instellen

Pauze

Afbreken

Behandelingen

Custom	25/06/2012	0.487 J uvB
Custom	25/06/2012	0.390 J uvB
Custom	25/06/2012	0.312 J uvB
Custom	25/06/2012	0.250 J uvB
Custom	25/06/2012	0.200 J uvB
Default	1/06/2012	0.50 J uvA
Default	23/05/2012	0.80 J uvA
Totaal uvA		9 J
Totaal uvB		2 J

Ms Gucci, Viviane

Via Calzaiuoli 24

Firenze

viv@gucci.it

Druk hier om de stralingsintensiteit, tijd en hoeveelheid Joule tijdens een behandeling

Knoppen om de cabine in te stellen, behandeling te starten/pauzeren of ogenblikkelijk af te breken

Lijst van behandelingen die patiënt reeds kreeg


Totale hoeveelheid straling die patiënt kreeg toegediend

Voordelen PUVA Control

- Uniek gebruik van de Apple iPad
- Cabine-status volgen op afstand
- 6 behandelprofielen (voor bv. verschillende huidtypes)
- Complete patiënten databank (met een referentie naar uw bestaande patiëntengegevens)
- Historisch overzicht van de behandelingen per patiënt
- Afdrukbare patiënt fiche en patiëntenlijst
- Levenslang gratis upgrades van de app

Voeg Patiënt Toe **Behandelingsprofiel voor Patiënt**

Behandelingsprofiel

UIT  1 2 3 4 5 **6**

UVA/B Behandeling

UV-Type	UVA UVB
Startwaarde	0.000 - 5.000 J
Eindwaarde	0.000 - 5.000 J
Verhoog In	% Joule
Verhoging per Sessie	0 - 100 %
Elke Sessie Dubbel	<input type="checkbox"/>
Extra Sessies bij Eindwaarde	0 - 15 Sessies

Stel een behandeling in die specifiek is voor de patiënt: "custom"

Of kies uit 6 instelbare behandelingsprofielen (bv. één per huidtype): "6 presets"

Kies voor een uVA of uvB behandeling

Geef een start- en een eindwaarde in voor de dosis

Verhoog de dosis bij elke sessie procentueel of met een vaste waarde (Joule)

Schakel deze knop aan om telkens 2 sessies met dezelfde dosis te geven alvorens de dosis te verhogen

Geef eventueel nog een aantal extra sessies met de maximale dosis als de eindwaarde bereikt is

DELCOMp Puva Combi Light

- Ervaren met UV-therapiesystemen sinds 1995
- Betrouwbare Arkade PCL technologie
- Volledig gamma van moderne phototherapeutische toestellen
- Belgisch product
- Constante innovatie om U meer tijd te geven voor de patiënten (bv. iPad app)

Dank U!

DELCOMp Puva Combi Light